

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Banda que contiene geles terapéuticos en perlas para realizar terapias de frío-calor. Ideales para la recuperación física.

Instrucciones:

- Efecto frío: Guardar en el congelador un mínimo de 30 minutos. No permitir que las perlas de gel se congelen. Colocar en la zona deseada ajustandola con las asas.
 - Efecto calor: Calentar en el microondas 45 segundos hasta obtener la temperatura deseada. No sobrepasar el máximo de tiempo mecionado para el microondas, ya que se puede dañar el producto. Puedes hacer intervalos luego de 5 segundos para alcanzar la temperatura deseada. Colocar en la zona deseada ajustandola con las asas.
- * No aplicar sobre piel sensible y/o heridas.
 - * Sólo uso externo.
 - * Lavar con jabón suave